

# gke Steri Record®

## Indicatori di Emulazione per pacchi, containers, ecc. conformi alla EN- ISO 11140-1- CLASSE 6


### Modo d'impiego

Gli indicatori per il monitoraggio dei pacchi sono usati nei processi di sterilizzazione a vapore per monitorare la sterilizzazione riuscita all'interno dei pacchi, containers, ecc. Questi indicatori devono essere usati soltanto nel caso in cui siano sterilizzati carichi solidi e porosi. Tutti gli indicatori per il monitoraggio dei pacchi forniscono soltanto un'informazione relativa alla sterilità sulla parte superiore della superficie di uno strumento nel punto in cui sono collocati. Per monitorare carichi cavi, ad esempio tubi e strumenti per la chirurgia mini-invasiva (MIC), devono essere utilizzati indicatori di classe 2 collocati in un PCD.

Indicatore

Riferimento di colore  
( per una facile  
interpretazione )

Parametro  
temperatura-tempo

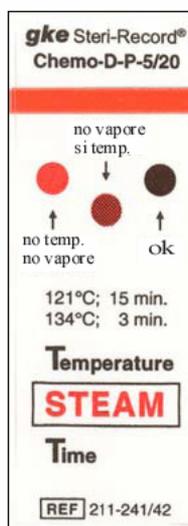

### Caratteristiche di prestazione

L'indicatore di emulazione **gke** per il monitoraggio dei pacchi corrisponde ai requisiti di un indicatore di **classe 6** in conformità alla EN –ISO 11140-1 e monitora tutti i parametri critici ( vapore e temperatura durante un periodo di tempo). L'indicatore cambia il suo colore al nero soltanto se un adeguato parametro di temperatura-tempo è stato raggiunto e il vapore è presente.

### Vantaggi

- Monitoraggio di tutti i parametri critici in un processo di sterilizzazione a vapore ( Temperatura, Vapore, Tempo)
- Compatibile con il sistema di documentazione **gke** con le etichette auto-adesive per fornire una documentazione correlata al paziente.
- Facile da usare
- Superficie laminata per prevenire il rilascio di colori e il trasferimento di sostanze chimiche sui materiali
- Facile interpretazione del cambiamento di colore dal rosso al nero. Il riferimento del colore è stampato su ogni etichetta, quindi non è necessaria nessuna cartina di riferimento di colore separata.
- La modalità funzionale del prodotto e il processo di produzione forniscono un indicatore complesso, ma a costo limitato.
- Dispositivo semplice ed ecologico

### Descrizione del prodotto

L'indicatore di emulazione **gke** è autoadesivo con una dimensione di cm. 6,6 x 2,3 ed è disponibile in confezioni da 250, 500 o 2.000 pezzi. Dopo l'utilizzo nella sterilizzatrice, l'indicatore può essere trasferito dal pacco alla documentazione del paziente.

### Informazione per l'ordine di indicatori di simulazione dei pacchi gke – Steri- Record®

Descrizione del prodotto	Quantità	Codice
Chemo-D-P-2,5	250	211-243
Chemo-D-P-5	500	211-242
Chemo-D-P-20	2.000	211-241

Prodotto da:  
gke –mbH  
Waldems-Esch  
Germania

Distribuito in Italia da:  
Medix Italia srl – Torino  
Tel. 011 5185259 – Fax 011 4407156  
e-mail: commerciale@medixitaliasrl.it  
medixitalia@virgilio.it