

Smart Drain

DRENAGGIO SCANALATO
A ESTRUSIONE UNICA
CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA

Il profilo ad estrusione unica con 4 canali garantisce una elevata superficie di drenaggio rispetto ai tradizionali tubi con perforazione.

Scanalato ad unica estrusione per una azione di drenaggio continua e costante, senza rischi di ostruzione e/o occlusione.

Smart Drain è realizzato con uno speciale elastomero di silicone StatSil® con azione specifica antibatterica attivo su largo spettro.

(StatSil® Elastomer è un marchio registrato di Momentive Performance Materials Inc.)


Il profilo ad estrusione unica permette un facile utilizzo specialmente negli interventi chirurgici con tecnica laparoscopica.



REDAX®
dall'esperienza, le nuove tecnologie del drenaggio

PROFILO INNOVATIVO CON ESTRUSIONE UNICA


- Smart Drain permette un trasferimento immediato dei liquidi di drenaggio tra la sezione scanalata ed il tubo di connessione, senza riduzione di lume interno (vedi disegno 1).
- Nessun rischio di ostruzione o di interruzione del drenaggio grazie alla innovazione tecnologica che permette continuità di flusso ai liquidi di drenaggio.
- Nei drenaggi tradizionali ad estrusione unica "tipo Hubless" il trasferimento dei liquidi di drenaggio non è immediato e vi è una forte riduzione nel flusso ed elevato rischio di ostruzione del drenaggio (vedi disegno 2).

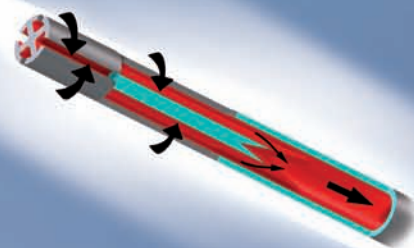

Disegno 1. SMART DRAIN

UN ELASTOMERO CON ARGENTO!

- L'utilizzo dell'Argento per ridurre le infezioni delle ferite deriva dalla elevata efficacia battericida degli ioni Ag^+ , anche a basse concentrazioni. L'Ag, inoltre, agisce anche sul metabolismo cellulare dei batteri inibendo il trasporto attraverso la barriera cellulare e la riproduzione.
- La presenza dell'Argento, disperso in modo permanente all'interno dell'elastomero di silicone, consente di ridurre drasticamente la carica batterica nell'area ove è posizionato il drenaggio contribuendo a eliminare il rischio di infezioni postoperatorie. Tale effetto si esplica anche nei confronti delle infezioni provenienti dall'ambiente esterno per mezzo del punto di inserimento del drenaggio attraverso la cute.

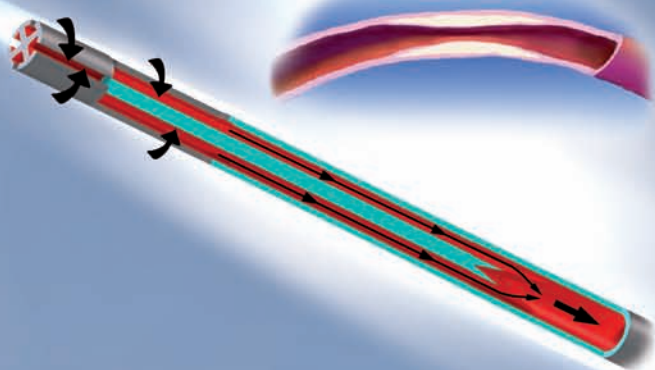

Disegno 2. Drenaggio tradizionale "tipo Hubless"

SMART DRAIN è ideale per qualsiasi procedura chirurgica ed in particolare:

- Accesso per via laparoscopia e nella chirurgia mini-invasiva.
- Chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.
- Cardio-Toracica e Vascolare.
- Ortopedia e Traumatologia.
- Chirurgia Addominale e Digestiva.



SMART DRAIN con protezione anti-batterica	Standard	c/ago
3,2 mm - CH 10 con Elastomero con Argento	24810	24802
3,0 mm - CH 12 con Elastomero con Argento	24812	24805
5,0 mm - CH 15 con Elastomero con Argento	24815	24803
6,3 mm - CH 19 con Elastomero con Argento	24819	24804
8,0 mm - CH 24 con Elastomero con Argento	24824	-
SMART DRAIN	Standard	c/ago
3,2 mm - CH 10	24710	24702
3,0 mm - CH 12	24712	24705
5,0 mm - CH 15	24715	24703
6,3 mm - CH 19	24719	24704
8,0 mm - CH 24	24724	-

CONFEZIONE: 10 PEZZI PER SCATOLA



REDAX®
dall'esperienza, le nuove tecnologie del drenaggio

REDAX S.r.l. Via Volta, 51 - 41037 Mirandola (MO) ITALY

Tel. +39 0535 611673 Fax +39 0535 23224 - E-Mail: info@redax.it - www.redax.it