

UNICO®



LA TOUTE DERNIÈRE SOLUTION
EN MATIÈRE DE DRAINAGE PERCUTANÉ


Un dispositif innovant, pratique et sûr pour le drainage du pneumothorax spontané ou traumatique, en cas d'hémithorax et d'emphysème médiastinal et sous-cutané, valable également pour les épanchements péricardiques.

UNICO est le seul dispositif avec tube de rallonge qui évite la formation d'hématomes et de nécroses tissulaires pouvant survenir avec les systèmes traditionnels quand le patient est allongé.




REDAX®
issues de l'expérience, les nouvelles technologies du drainage



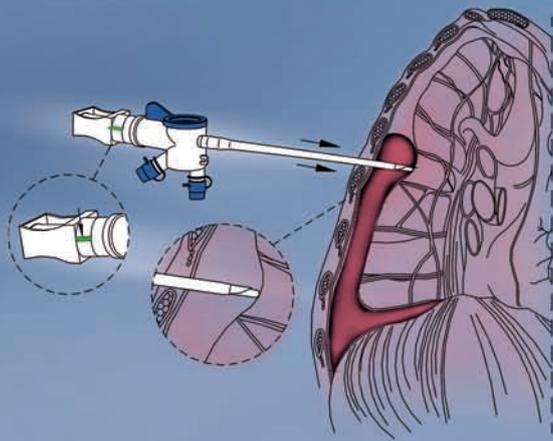


1.

Mise en place sûre du cathéter à pointe atraumatique escamotable dans l'espace intercostal. Un indicateur vert signale la condition de sécurité pour le patient. (Fig.1)

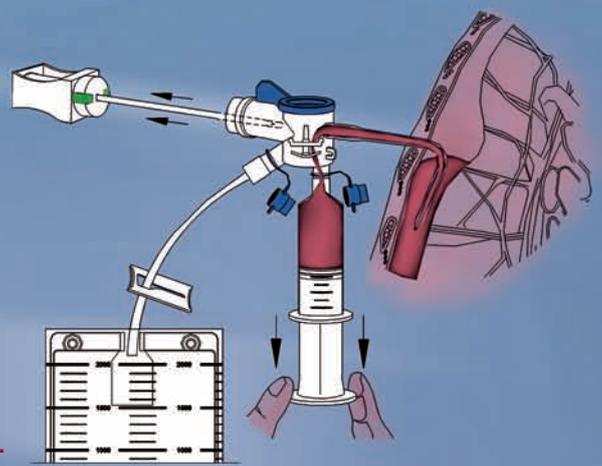


2.

Une fois le cathéter mis en place, il est possible de retirer totalement l'aiguille sans aucun risque pour le patient grâce à la valve de non-retour intégrée. Le drainage par gravité ou à l'aide d'une seringue « push-pull » est immédiatement disponible. (Fig. 2)

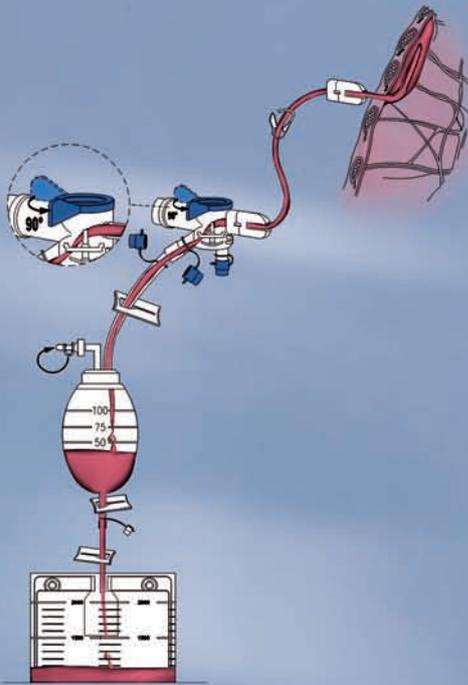

3.

Le recours à un réservoir en silicone (en mesure d'appliquer une pression négative de $-20\text{cmH}_2\text{O}$) permet d'activer aussi bien le drainage aspirant que le monitoring des fuites aériennes du patient. (Fig.3)

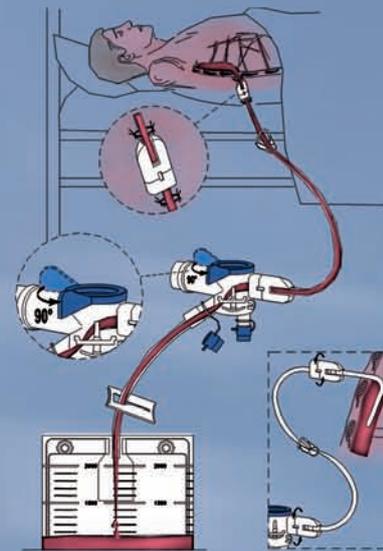

4.

Le tube de rallonge à disposition donne au patient la possibilité d'adopter une position allongée au confort optimal, ce qui permet d'éviter des complications (hématomes et nécroses) tout en facilitant la gestion du dispositif de la part du personnel hospitalier. (Fig.4)

Désignation du produit	Code	Pièces par boîte
Kit percutané CH 9	10800	5
Kit percutané CH 12	10801	5
Kit percutané avec tubulure de rallonge CH 9	10802	5
Kit percutané avec tubulure de rallonge CH 12	10803	5

Accessoires	Code	Pièces par boîte
Mandrin CH 9 pour code 10800/10802	10809	10
Mandrin CH 12 pour code 10801/10803	10811	10
Reservoir siliconé pour la surveillance du bullage	10808	10
Poche de Drainage	12019	25



REDAX S.r.l. Via Volta, 51 - 41037 Mirandola (MO) ITALY

Tel. +39 0535 611673 Fax +39 0535 23224 - E-Mail: info@redax.it - www.redax.it