


UNICO®



L'ULTIMA SOLUZIONE NEL DRENAGGIO PERCUTANEO

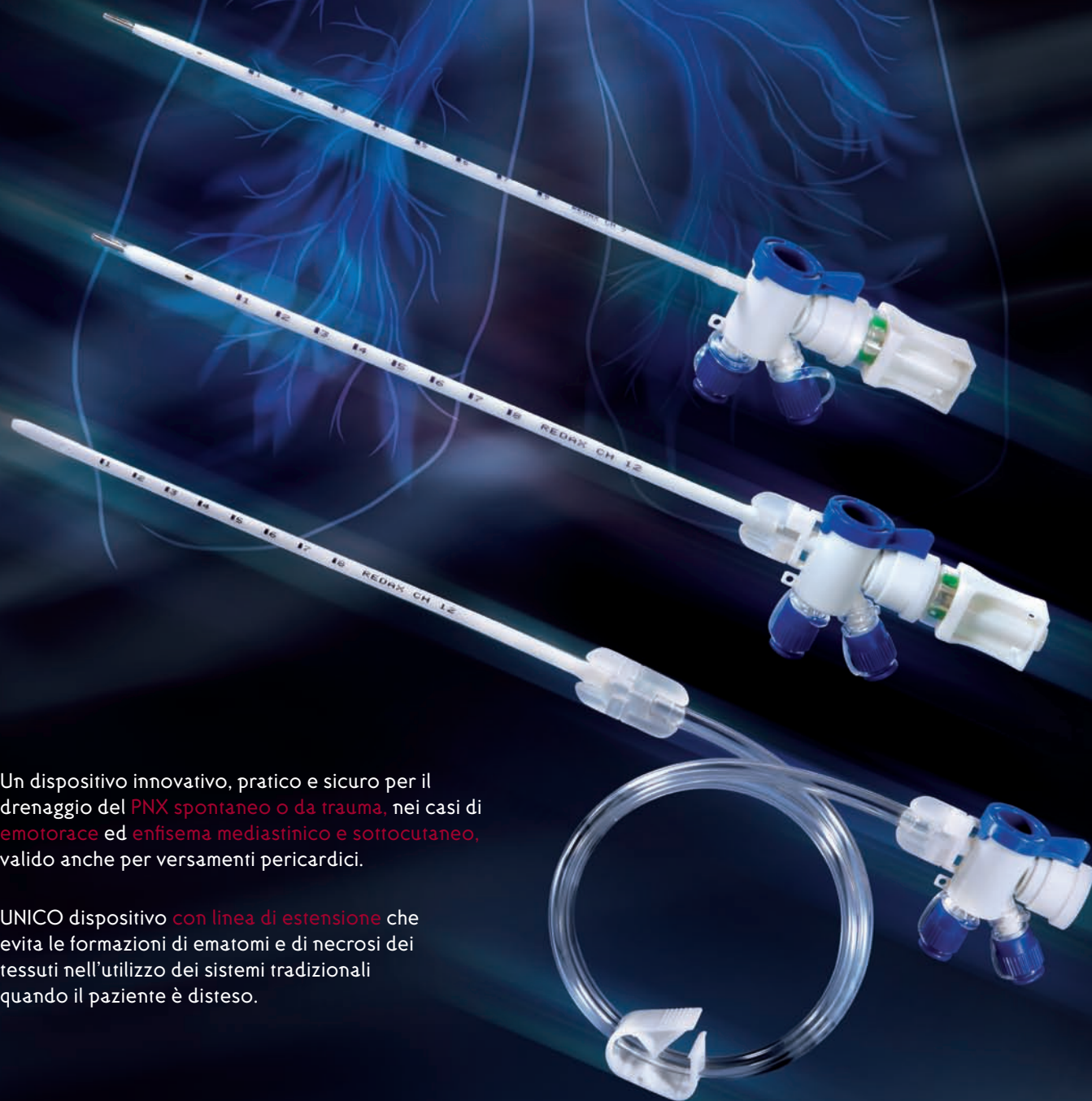


Un dispositivo innovativo, pratico e sicuro per il drenaggio del **PNX spontaneo o da trauma**, nei casi di **emotorace** ed **enfisema mediastinico e sottocutaneo**, valido anche per versamenti pericardici.

UNICO dispositivo **con linea di estensione** che evita le formazioni di ematomi e di necrosi dei tessuti nell'utilizzo dei sistemi tradizionali quando il paziente è disteso.




REDAX®
dall'esperienza, le nuove tecnologie del drenaggio

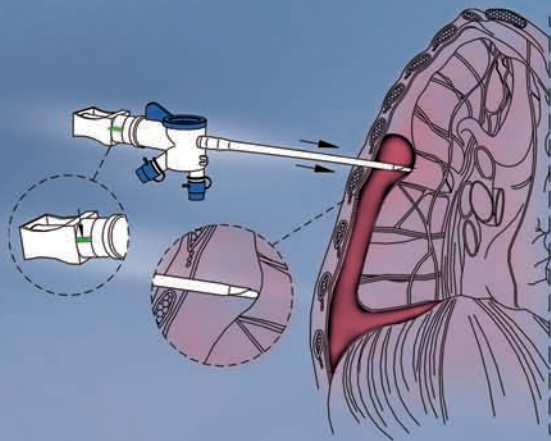


1.

Inserimento sicuro del catetere a **punta atraumatica retrattile** nello spazio intercostale. Un **indicatore verde** segnala la condizione di sicurezza per il paziente. (Fig.1)

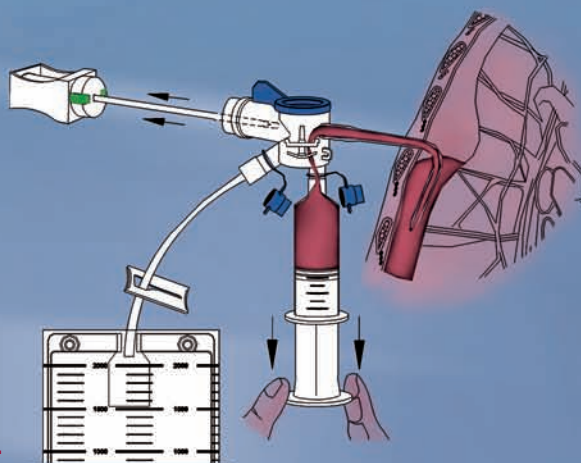


2.

Completato l'inserimento del catetere, si rimuove completamente l'ago cannula senza rischi per il paziente **grazie alla valvola di non ritorno integrata**. Il drenaggio, per gravità o con l'ausilio della siringa "pull and push", è immediatamente disponibile. (Fig.2)

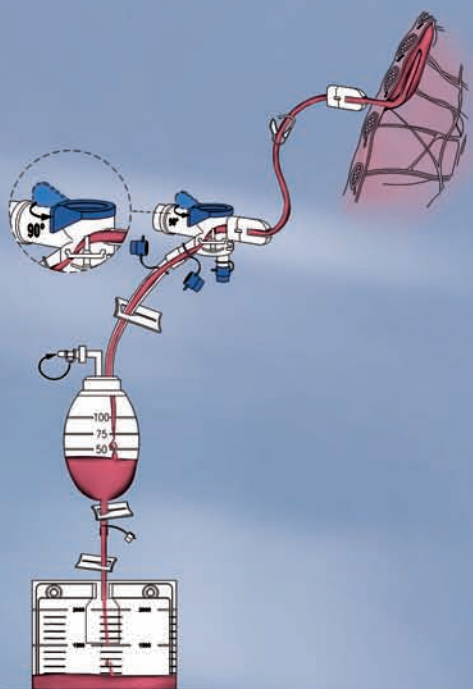

3.

Utilizzando un **bulbo di silicone**, in grado di applicare una negativa di $-20\text{cmH}_2\text{O}$, è possibile sia attivare il drenaggio in aspirazione che il monitoraggio delle perdite aeree del paziente. (Fig.3)

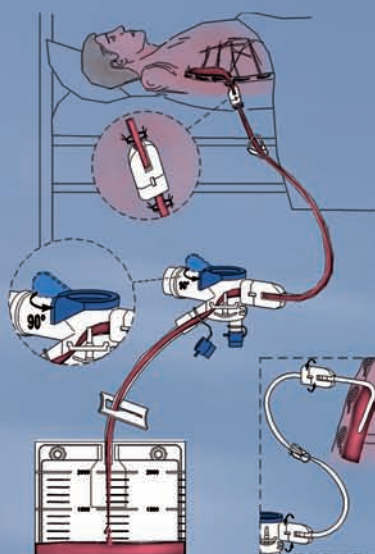

4.

Grazie alla disponibilità di una **linea di estensione** il paziente può assumere una posizione distesa nel massimo comfort. **In questo modo si evitano complicazioni (ematomi e necrosi)**, agevolando la gestione del dispositivo da parte del personale ospedaliero. (Fig.4)

Descrizione prodotto	Codice	Confezione pz. per scatola
Set Percutaneo CH 9	10800	5
Set Percutaneo CH 12	10801	5
Set Percutaneo con linea di estensione CH 9	10802	5
Set Percutaneo con linea di estensione CH 12	10803	5

Accessori	Codice	Confezione pz. per scatola
Mandrino CH 9 per cod. 10800/10802	10809	10
Mandrino CH 12 per cod. 10801/10803	10811	10
Bulbo di silicone per monitoraggio perdite	10808	10
Sacca di drenaggio	12019	25



REDAX S.r.l. Via Volta, 51 - 41037 Mirandola (MO) ITALY

Tel. +39 0535 611673 Fax +39 0535 23224 - E-Mail: info@redax.it - www.redax.it